

サポートバー（折上式）

W601

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。取り付け・ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また本説明書はいつでもご覧になれるところに保管しておいてください。


■特長

- ループ状になった安定感のある手すり。トイレでの立ち座りの際などに便利です。
- ループ形状の上段・下段のどちらにもつかまることができます。

■梱包内容

<手すり本体>

- ① 手すり本体 × 1 本
- ② S10 フィッシャープラグ × 4 個
- ③ M8 コーチスクリュー × 4 個
- ④ M8 ワッシャー ④ × 4 個
- ⑤ ネジキャップ ⑤ × 4 個

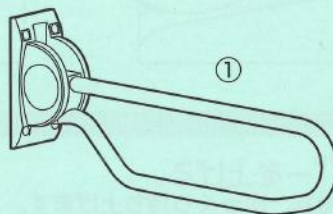

■仕 様

材質／ループ部：スチール（エポキシ粉体塗装） ベース部：ガラス繊維強化ナイロン

■取り付けの際の注意




注意


- ▼ 手すりは十分な強度を持つ構造材、またはその構造材に固定された補強板に取り付けてください。強度が不十分な壁面に取り付けることは、重大な事故発生の原因になります。
- ▼ 必ず 4 本のコーチスクリュー、または市販の M8 ボルトで固定してください。
- ▼ 下地がはっきりしない場合やネジが効かない場合は、必ず工務店など専門職の方に取り付けを依頼してください。
- ▼ 手すり取り付け後、ぐらつきや緩みがないことをよく確認してからご使用ください。

参考：手すりを取り付ける壁面の厚み

(1) コンクリートの場合……厚さ約 100mm 以上

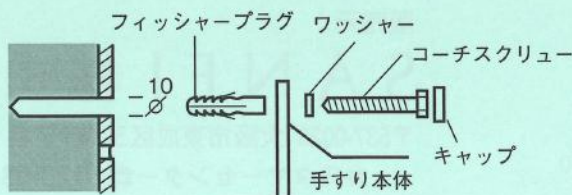

(2) 木造の場合（構造材または補強板）……厚さ約 105mm 以上

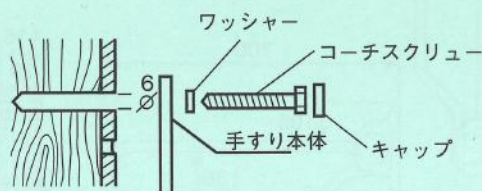


■取り付けの手順


ご用意いただく工具

- 1) ボックスレンチ
- 2) 電動ドリル
下地がコンクリートや
タイルの場合に使用。
- 3) ドライバー


① 取り付け位置に印をつけます。

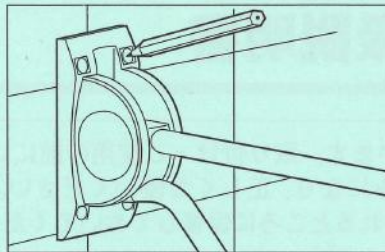


② 印をつけた位置にドリルで下穴を開けます。

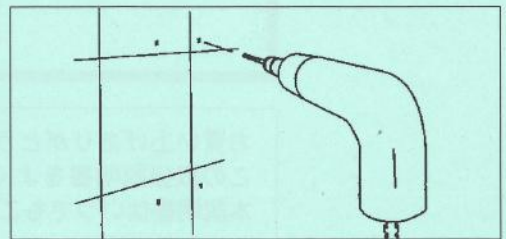

③ 付属のフィッシャープラグ②、コーチスクリュー③、ワッシャー④を使い、手すり本体①を固定します。

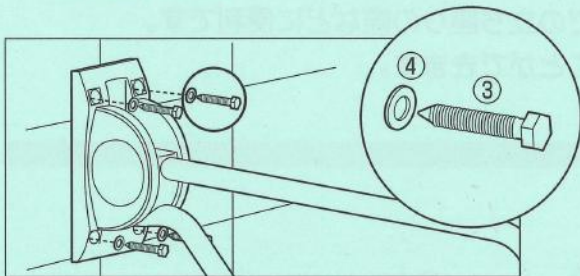


④ ネジキャップ⑤を取り付けます。

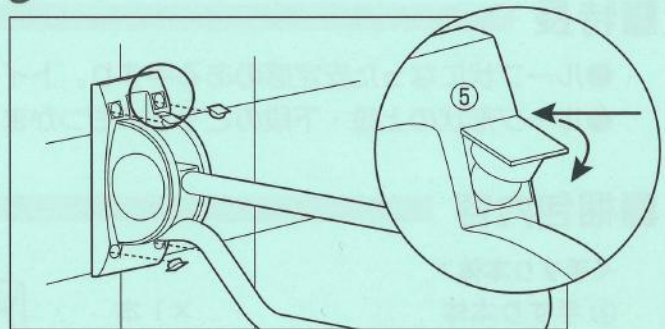

■使用方法



① サポートバーを上げる。
ループ部を持ち、ゆっくり持ち上げます。
最大限まで（90度の位置まで）上げると真下に落ち、手すりが垂直になった状態でロックされます。

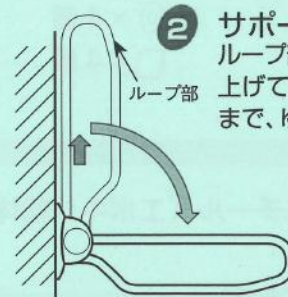


② サポートバーを下げる。
ループ部を持ち、いったん真上に持ち上げてから、手すり部が水平になるまで、ゆっくり引き下げてください。

⚠️ 注意

- ▼ 折り上げているまたは下げている途中で手を放さないでください。途中で手を放すと手すりが下がります。
- ▼ 折り上げたまま使用する場合は、つかまる前に手すりがしっかりロックされているかご確認ください。ロックされていないと手すりが急に下がります。
- ▼ ネジは取り付け後、使用状況によっては緩んでくる場合があります。その場合は「増締め」してご使用ください。

■寸法

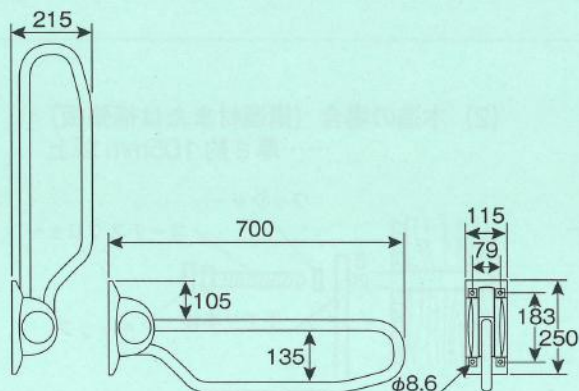

※ 廃棄の際は地域の規定に従い、正しい方法で廃棄してください。

販売元：

SANEI 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

カスタマーセンター ☎ 0120-06-9721

受付時間 9:00～17:30 (土日祝除く)